



REXONEYE

ПРЕОТКРИЙТЕ
ЛЕЧЕНИЕТО НА
СИНДРОМА СУХО ОКО



REXON-EYE® ТЕРАПИЯ

Rexon-Eye® е неинвазивен апарат, който третира причината за синдрома „сухо око“, осигурявайки дългосрочни резултати при всичките му форми.

Действа чрез прилагане на нискомощен, височестотен, електрически ток, способен да стимулира метаболизма и естествената регенерация на клетките.¹

Лечението е насочено към всички форми на „сухо око“, както при евопоративна, така и при воден дефицит, което се доказва от субективни и обективни измервания, докладвани в публикувани клинични проучвания.⁴

Апаратът се прилага успешно и е високо оценен в световен мащаб от офталмолози и оптометристи.



QMR® е регистрирана марка на Telea Electronic Engineering, Italy.

QMR® КВАНТОВ МОЛЕКУЛЯРЕН РЕЗОНАНС

Принципът на действие на Rexon-Eye® е QMR® технология, която доставя слаб променлив електрически ток, съдържащ специфична комбинация от честоти (от 4 MHz до 64 MHz), за която е доказано, че стимулира естествената регенерация на клетките.¹

Повече от 15 години тази патентована технология се използва безопасно и успешно за лечение на заболявания в няколко области на медицината, като естетична медицина, физиотерапия, заздравяването на рани.⁵

1. Sella et al., PLoS ONE, 2018

2. Pedrotti et al., Br. J. Ophthalmol. 2017

3. G. Ferrari et al., Cornea July 2019

4. A. Trivli et al., J. of Optometry, 2022

5. Fracalvieri et al., Int. Wound J., 2017

REXONEYE ТЕРАПИЯ

4

терапевтични
сесии

20

минути
всяка

1

седмица
интервал

ПОЛЗИ

- ✓ Ефективна терапия за всички форми на сухо око, както при евопоративна, така и при воден дефицит или смесена форма.
- ✓ Дългосрочни ползи, започващи по време или непосредствено след терапията.
- ✓ Комфортна, приятна и релаксираща процедура за пациента.
- ✓ Стимулира регенерацията на тъкани и клетки.
- ✓ Намалява възпалението.

КАК РАБОТИ

Терапията се извършва чрез контактни електроди, вградени в маска, която се поставя върху затворените очи на пациента. Настройката на устройството е бърза, лесна и интуитивна.

Операторът трябва само да избере мощността и продължителността на терапията чрез завъртане и натискане на основния бутон.


За успешна терапия обособете тиха зона и създайте спокойна атмосфера, за да осигурите оптимален резултат.

Апаратът Rexon-Eye® представя предимствата на QMR® в офталмологията. Първото приложение е при лечението на "сухо око" - синдром, засягащ няколкостотин милиона души по света.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ✓ LCD дисплей
- ✓ Захранващо напрежение и честота: 100-230V ~ 50 / 60Hz, Консумирана енергия 300 VA
- ✓ Максимална изходна мощност: 40W / 200 Ω dual channel (mask)
- ✓ Работен честотен спектър: 4-64 MHz
- ✓ Class IIa устройство (Директива 93/42/ЕЕС)
- ✓ Тегло: 8 кг
Размери: 40x18x35cm

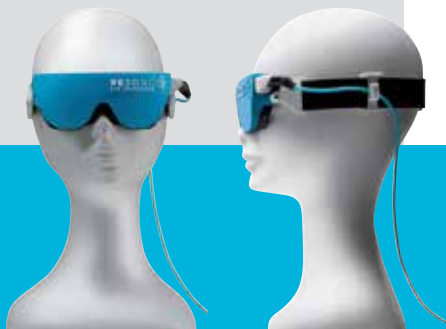

REXONEYE

CE 0051

Патентован в EU, USA и други държави.

Производител:

RESONO
OPHTHALMIC

Resono Ophthalmic S.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 13 -
36066 Sandrigo (VI) - Italy



2014/2020

POR
FESR / REGIONE DEL VENETO



Представител за България:

Bikomed
YOUR MEDICAL PARTNER

Медицинско изделие.

За пълен списък с показания, противопоказания и предупреждения, прочетете ръководството за употреба.

За повече информация:

Бикомед ООД – официален дистрибутор за България
гр. София, бул. "Н.Й.Ванцаров" 53Б;
тел: 02/955 3695