


3M™ Tegaderm™ I.V.

Tegaderm™ I.V.

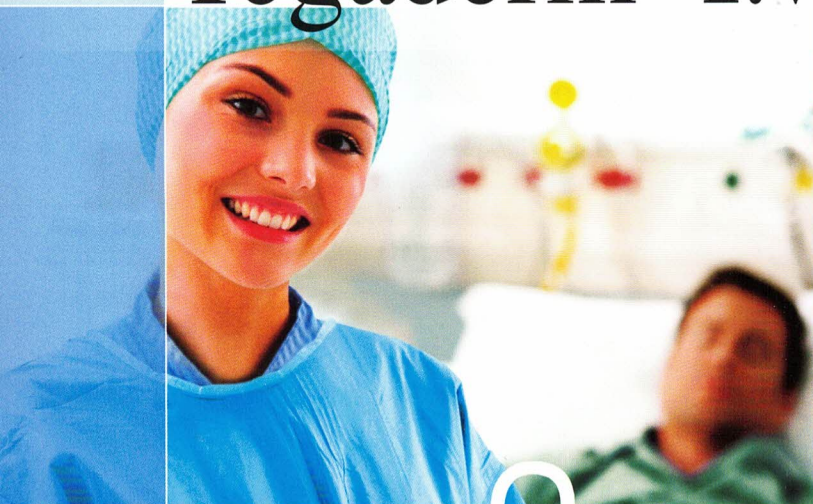




доверие основано  
на резултати

# Превръзките 3M™ Tegaderm™ I.V.

Успехът на интравенозното лечение изисква надежден източник, здраво прикрепен във вената, като входното отверстие трябва да се пази от инфекция, травма и флебит. Превръзките Tegaderm предоставят нови възможности, както при централни, така и при периферни източници.


## Лесно поставяне

- Уникалната система с хартиена рамка улеснява правилното поставяне
- Възможност за здраво и надеждно фиксиране на крилцата на катетри тип “бътерфлай”
- Допълнителни ленти 3M Medipore за подsigуряване на интравенозни канюли и централни източници
- Етикет за надписване на датата и часа на поставяне на канюлата или смяна на превръзката
- Прозрачното покритие позволява наблюдението, без да се сменя превръзката
- Овалният контур на превръзката позволява по-добро пасване по извивките на тялото

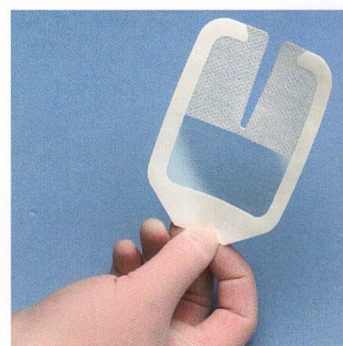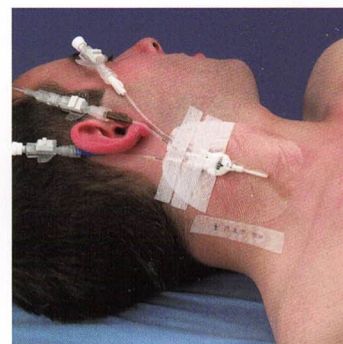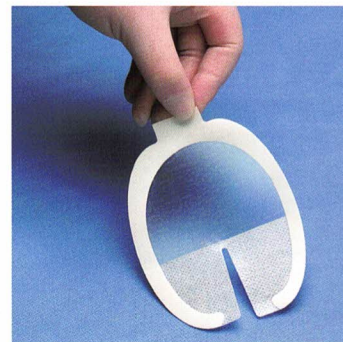


## Сигурна фиксация

- Традицията на 3M при производството на адхезиви дава възможност за надеждно покритие по цялата повърхност на превръзката, с което се постига по-добро самозалепване и предпазва от повдигане на краищата.
- Допълнителното укрепване с друга лепенка подобрява здравината и сигурността на превръзката
- Допълнителни ленти за фиксация на централни катетри и такива тип “бътерфлай”
- Удобният дизайн помага за по-добро залепване около катетъра и предотвратява повдигането на превръзката

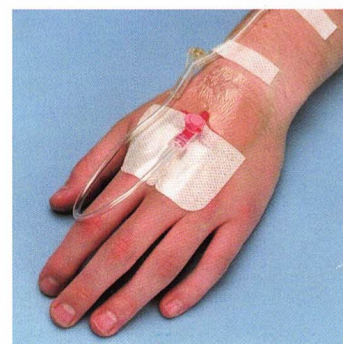





Ported (с прорез)

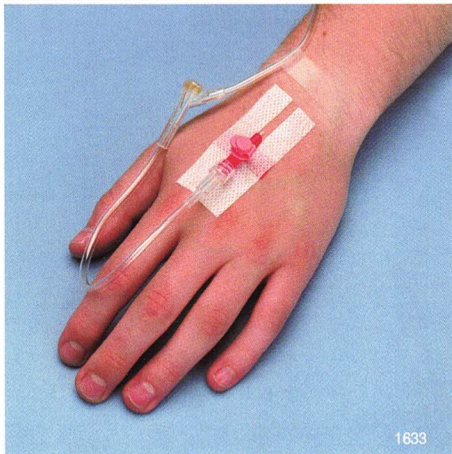

За по-голяма стабилност на каниюлата поставяте стерилните ленти 3M Medipore хоризонтално през крилицата на каниюлата.

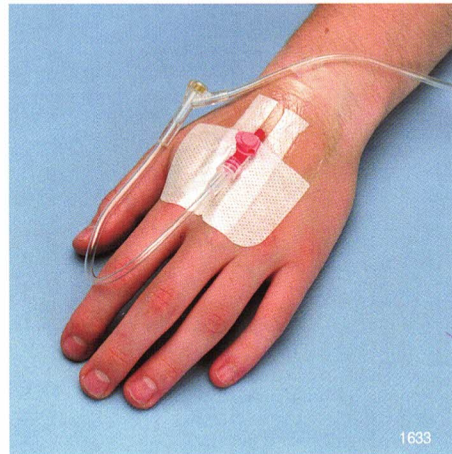


Удобният дизайн на укрепващата лепенка дава допълнителна сигурност и намалява риска от флебит. Превръзката Tegaderm дава възможност за по-добро поставяне, наблюдение и водонепропускливост, което намалява риска от външно замърсяване.

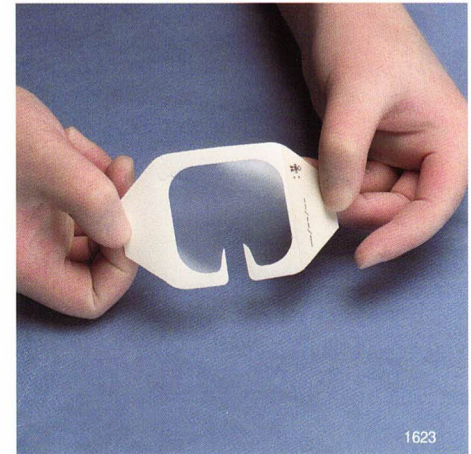

Уникалната система с хартиена рамка улеснява точното и безпроблемно поставяне и предотвратява прегъването и залепването на превръзката сама за себе си.


Кат. №	NSV Код	Описание	Размер (cm)	Лепенки/Кутия
1633	ELW056	3M™ Tegaderm™ 1633 I.V. Dressing	8.5 x 7	100
1623W	ELW071	3M™ Tegaderm™ 1623W Transparent Dressing с етикет	6 x 7 с прорез	100

Ported (с прорез)

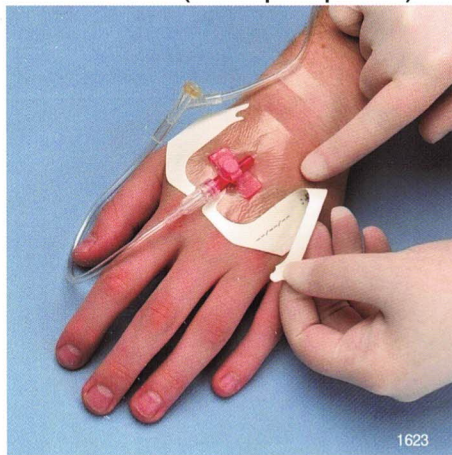


Превръзката Tegaderm 1623W IV е лесна за поставяне и наблюдение, водонепропусклива и предотвратява потенциалното инфектиране при кратковременна интравенозна терапия.

Non-Ported (без прорез)

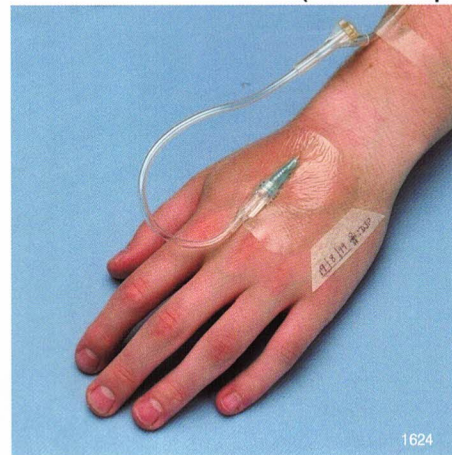

Микропорьозните етикети улесняват документирането на датата и часа на смяната на превръзката или на каниюлата.

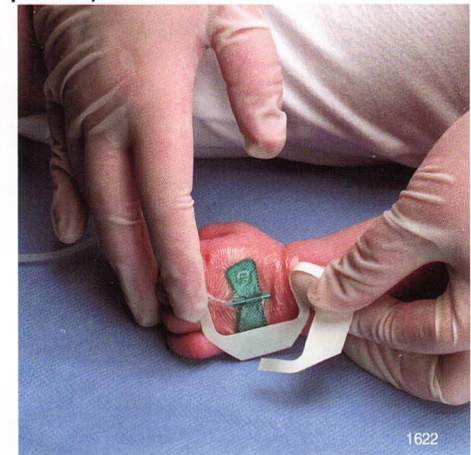


Превръзките Tegaderm посрещат предизвикателствата по отношение размера на превръзката, чувствителността на кожата, точното поставяне, както и трудностите при интравенозното лечение при деца.


Кат. №	NSV Код	Описание	Размер (cm)	Лепенки/Кутия
1622W	N/A	3M™ Tegaderm™ 1622W Transparent Dressing с етикет	4.4 x 4.4	100
1624W	ELW211	3M™ Tegaderm™ 1624W Transparent Dressing с етикет	6 x 7	100



## Югуларни

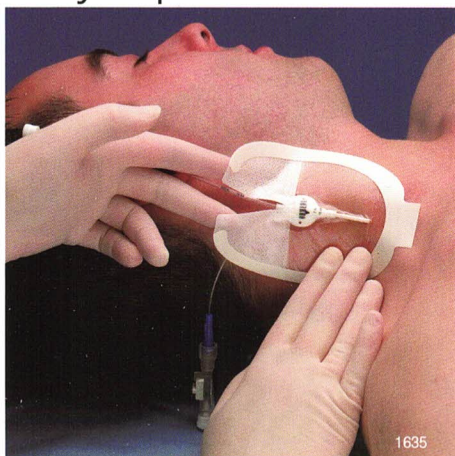


Уникалната система с хартиена рамка улеснява точното и безпроблемно поставяне и предотвратява прегъването и залепването на превръзката сама за себе си.

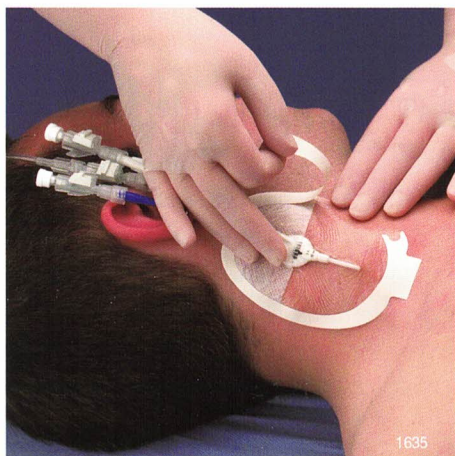

Укрепването с мека стерилна лепенка подобрява стабилността на превръзката дори и върху извити и многолуменни катетри. След като се постави превръзката Tegaderm I.V. хартиената рамка се премахва лесно, предоставяйки възможност за наблюдение на входното място на катетъра.


## Субклавия

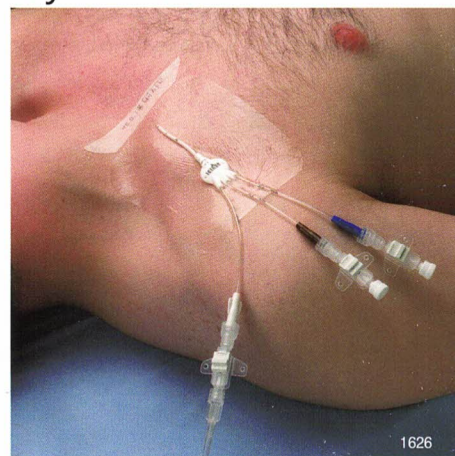

Транспарентните превръзки Tegaderm са сигурна защита на входното място на катетъра във вена субклавия. Стерилните микропорьозни етикети улесняват документирането на датата и часа на смяната на превръзката или на канюлата.

Кат. №	NSV Код	Описание	Размер (cm)	Лепенки/Кутия
1635	ELW074	3M™ Tegaderm™ 1635 I.V. Transparent Dressing with Securing Tape	8.5 x 10.5	50
1626W	ELW213	3M™ Tegaderm™ 1626W Transparent Dressing с етикет	10 x 12	50

## Субклавия

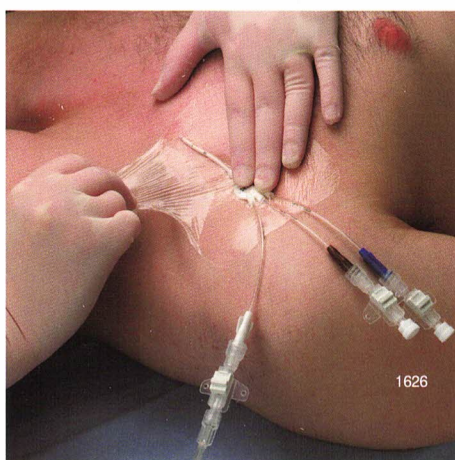


Превръзката Tegaderm се премахва лесно и безболезнено при използването на техниката с разтягане или опъване.

## Периферно въведени централни катетри



Превръзката Tegaderm 10 x 25 cm. е идеално приспособена за този тип катетри.

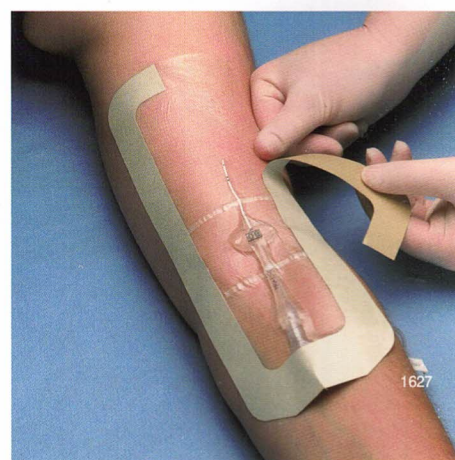

Уникалната система с хартиена рамка дава възможност за точна фиксация и предотвратява повдигането на превръзката. Тя може да бъде оставена без смяна до 7 денонощия и позволява лесното наблюдение на входното място.

Кат. №	NSV Код	Описание	Размер (cm)	Лепенки/Кутия
1627	ELW215	3M™ Tegaderm™ 1627 Transparent Dressing	10 x 25	20



## 3M™ Tegaderm™ превръзка за интравенозен път у децата


### Показания за употреба:

В детските отделения или в операционните зали за:

- Входните места на интравенозните катетри.
- Закрепване или покриване на втресъдовите изделия.

### Предимства:

- Прорязният им дизайн осигурява по-добро уплътнение около катетъра.
- Стерилните адхезивни лентички закрепват допълнително катетъра.
- “Дишаният” филм позволява обмяната на влажни пари и кислород.
- Прозрачната превръзка позволява лесно да наблюдавате интравензният път без нужда от нейната смяна.
- Уникалният модел на рамката ѝ спомага за предотвратяване на напрежението при поставяне на превръзката.
- Стерилната превръзка осигурява противобактериална и противовирусна преграда срещу външни замърсители.
- Безопасно поставяне.

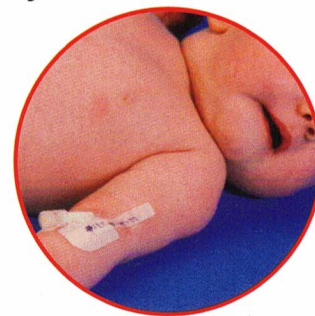

Код на 3M	Описание	Размер (см)	Лепенки/Кутия
1610	Превръзка 3M™ Tegaderm™ за интравенозен път (у деца)	5 x 5,7 см	100

## 3M™ I.V. превръзка от нетъкан текстил

### Показания за употреба:

3M I.V. превръзка може да се използва за покриване и предпазване на местата с поставени канюли за да подсигури канюлите, придържайки ги към кожата.

### Най-честите приложения са при:

- IV канюли
- Други интравенозни катетри и перкутанни устройства

### Предимства:


- Хипоалергична – може да се използва при пациенти с чувствителна кожа, Хепатит, възрастни пациенти и т.н.
- Стерилна
- Не съдържа латекс
- Уникалната ѝ форма позволява плътно прилепване около канюлата
- Отлична адхезия към кожата
- Допълнителната подложка (абсорбира кръв и ексудати)
- Удобна за работа

### Начин на поставяне:


1. Поставете абсорбиращата подложка под канюлата



2. Внимателно поставете превръзката върху канюлата, като поставете прореза на точното място

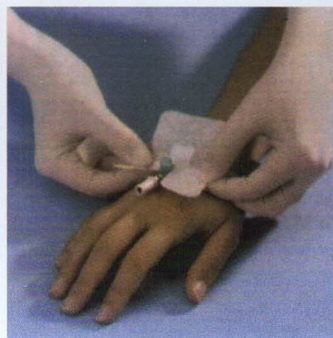


3. Притиснете я внимателно към кожата

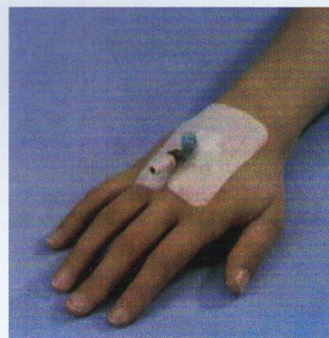



Код на 3M	Описание	Размер (см)	Лепенки/Кутия
3522	Превръзка 3M™ I.V. превръзка	5,1 x 7,6 см	50
3523	Превръзка 3M I.V. превръзка	6,0 x 8,0 см	50




## Превръзките 3M™ Tegaderm™ за интравенозни катетри

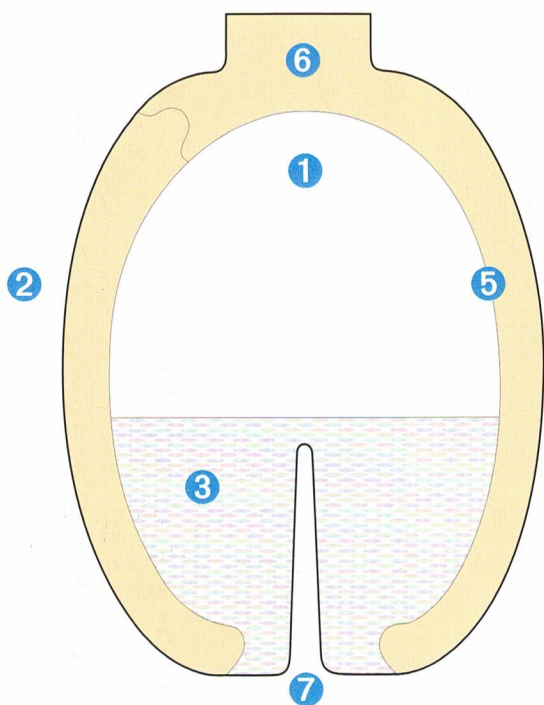

- 1** Прозрачно покритие върху входното отворстие:  
позволява наблюдение, без да има нужда от сваляне на превръзката и това предотвратява излишните смени
- 2** Овалната форма:  
улеснява поставянето по контурите на тялото, особено при катетри в югуларната област
- 3** Усилването с мека лепенка:  
подобрява здравината и сигурността на превръзката
- 4** Стерилната хирургична лепенка 3M Medipore:  
помага да се подсилят интравенозните канюли и централните източници

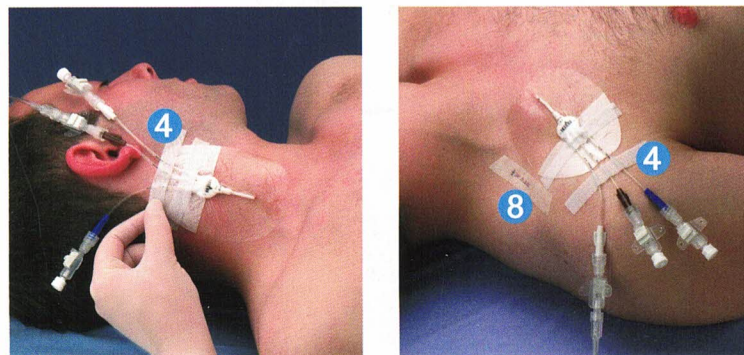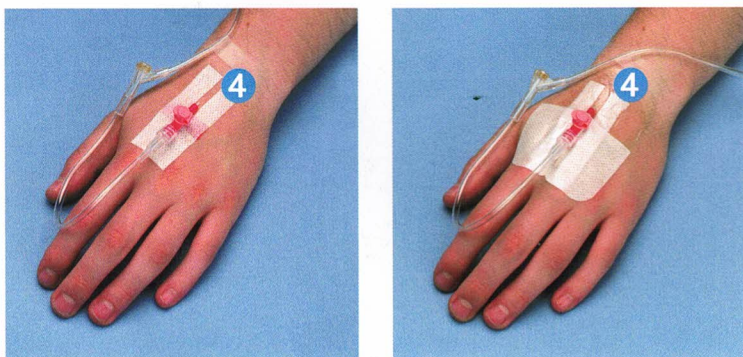

- 5** Водоустойчива филм превръзка - покритие на превръзката Tegaderm:  
разпростира се по цялата повърхност и предотвратява външно замърсяване
- 6** Уникалната система с хартиена рамка:  
улеснява поставянето и предотвратява залепването на превръзката сама за себе си
- 7** Подходящ дизайн:  
за точна и сигурна фиксация на крилцата и капачката на катетъра, Подобрява залепването около катетъра и избягва повдигането на превръзката като \*палатка\*
- 8** Микропорьозен етикет:  
за записване на датата и часа на поставяне на катетъра или на смяна на превръзката.

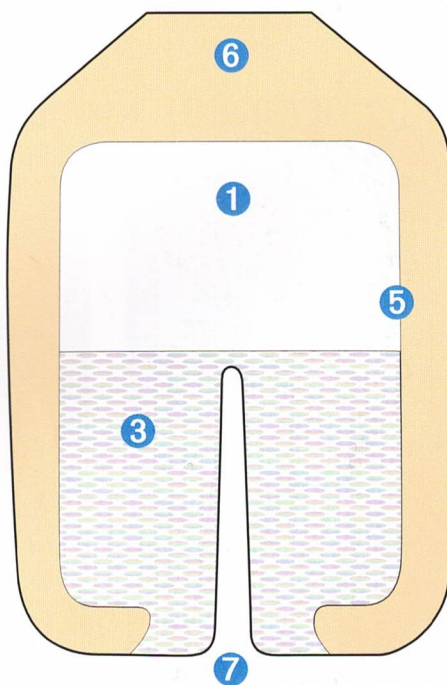

**3M е един от основните приносители за развитието на здравеопазването.**

3M Health Care предлага не само качествени материали но също и образователна дейност за правилната употреба на продуктите за получаване на оптимален резултат. 3M допринася за постигане оптималната цел на всички организации, свързани със здравеопазването: пациенти и здравен персонал без инфекции чрез продължаване на грижите.

3M, Tegaderm и Medipore са търговски марки на 3M Company.  
© 2000 3M Health Care.

**3M**

Търговско представителство

София 1766

Младост 4, Бизнес парк, бл. 4

тел.: 02/ 960 19 11

факс: 02/ 960 19 26

e-mail: innovation.bg@mmm.com

web: www.mmm.com

